

Votre meilleur allié
pour sauver une vie



FRED
PA-1



SCHILLER
FRANCE S.A.S

Schiller, une entreprise 100% Française

Schiller est l'unique fabricant Français de défibrillateurs.

Avec son centre de Recherche & Développement situé en Alsace, sur le même site que son usine de production, Schiller mène une politique d'innovation constante.

Car qualité rime avec suivi, Schiller possède un Service Client unique composé de spécialistes avec une présence nationale de proximité.

En maîtrisant ainsi chaque étape de la vie d'un produit, Schiller garantit la qualité de ses produits et services, afin d'assurer les meilleurs soins au patient.



R&D et production à Wissembourg (67)



Distribution à Bussy-Saint-George (77)



Service Client et logistique à Haguenau (67)




Leader de la défibrillation, Schiller a installé plus de 40 000 défibrillateurs en France entre 2008 et 2015.

Lors d'un arrêt cardiaque, chaque minute compte. Pour ne plus se poser de question sur la conduite à tenir, le nouveau défibrillateur Fred PA-1 prend les choses en main.

Un doute sur la gestion de la maintenance du défibrillateur ? Là encore, Fred PA-1 assure le suivi.

Quelle que soit la situation, Fred PA-1 vous accompagne : «**Je suis le premier défibrillateur entièrement autonome !**»

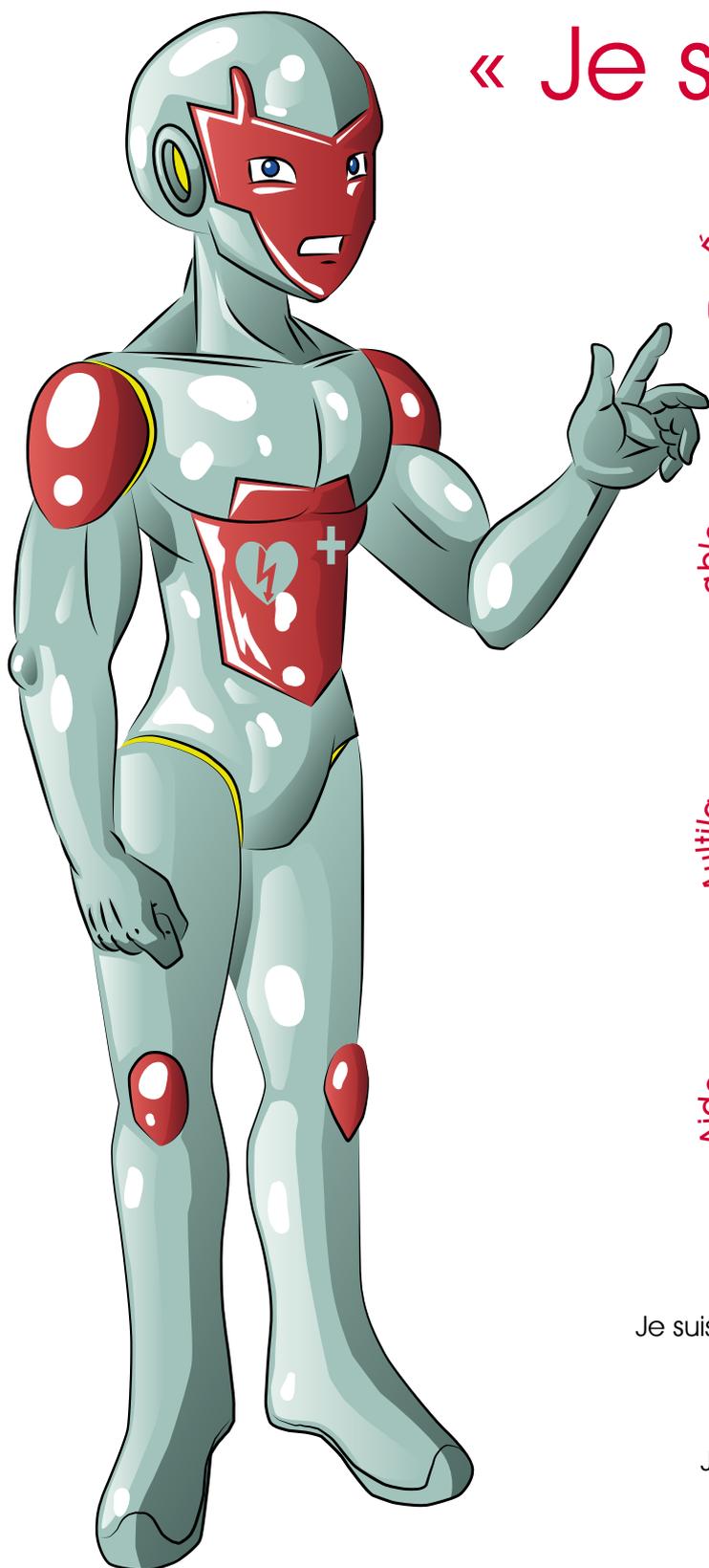

« Je suis FRED PA-1 »



Je suis équipé de la dernière technologie de défibrillation.

Je délivre un choc allant jusqu'à **200 joules**


Je suis disponible en mode **semi-automatique**
ou **entièrement automatique**



Suivez
Schiller France !



Je vous guide... ... pour la réanimation

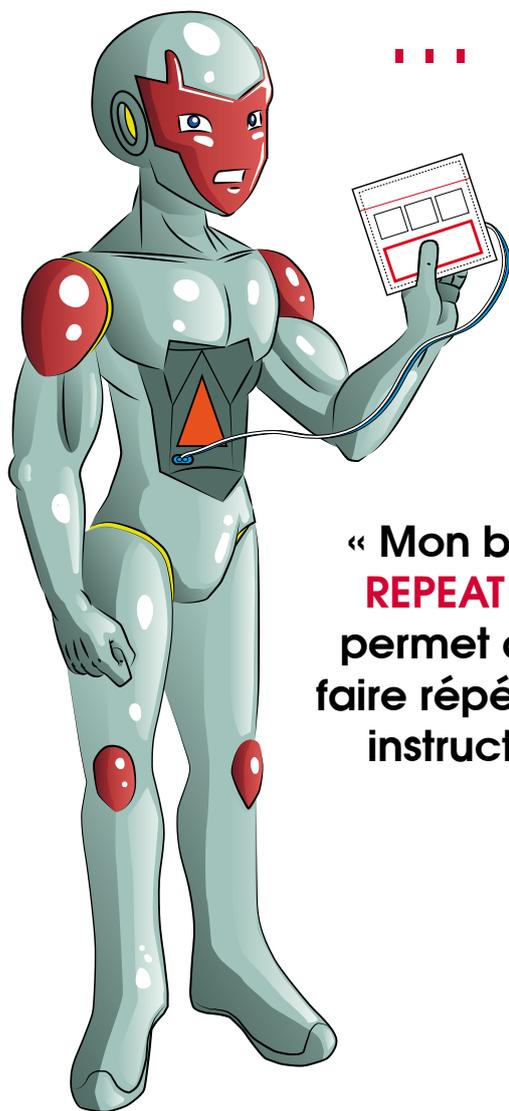

« Mon bouton
REPEAT vous
permet de me
faire répéter une
instruction »

Je suis facilement reconnaissable grâce à ma couleur rouge, **on me repère en 1 seconde**.

Je me mets en route dès l'ouverture de mon capot et je vous indique les étapes à suivre.

J'indique le numéro des secours et je rappelle la chaîne de survie.

Je géolocalise l'appareil pour les secours (en option).

Je vous guide pas à pas dans la réanimation (messages en conformité avec l'ERC* 2010 et les recommandations de l'ANSM*).

Je suis capable de délivrer un choc électrique dans un délai très court.

Je vous aide à réaliser un massage efficace : métronome et option Free CPR pour atteindre la fréquence de compression correcte sans matériel additionnel.

Je peux parler plusieurs langues : Français, Anglais, Allemand... (3 langues au choix, en option).



Je vous alerte... ... pour la maintenance

En veille, mes voyants distincts (pour les électrodes, la pile, la maintenance) vous renseignent à tout moment de **mon état de fonctionnement**.



Activité du Modem
Remplacer la batterie
Maintenance requise
Remplacer les électrodes

Je possède également une LED pour indiquer l'activité du modem lorsque l'option est installée


Je réalise des autotests réguliers et vous indique quand vous devez :

- Remplacer mes électrodes de défibrillation
- Changer ma batterie
- Réaliser mon entretien

J'opère les mises à jour logiciel, je contrôle l'état des piles et les résultats des auto-tests à distance (en option).

Ces mises à jour sont possibles grâce au logiciel SEMA Server qui permet également de **visualiser l'ensemble du parc** de défibrillateurs installés ainsi que leurs états respectifs.

« Mes électrodes sont munies d'un tag RFID pour m'indiquer quand elles doivent être remplacées »

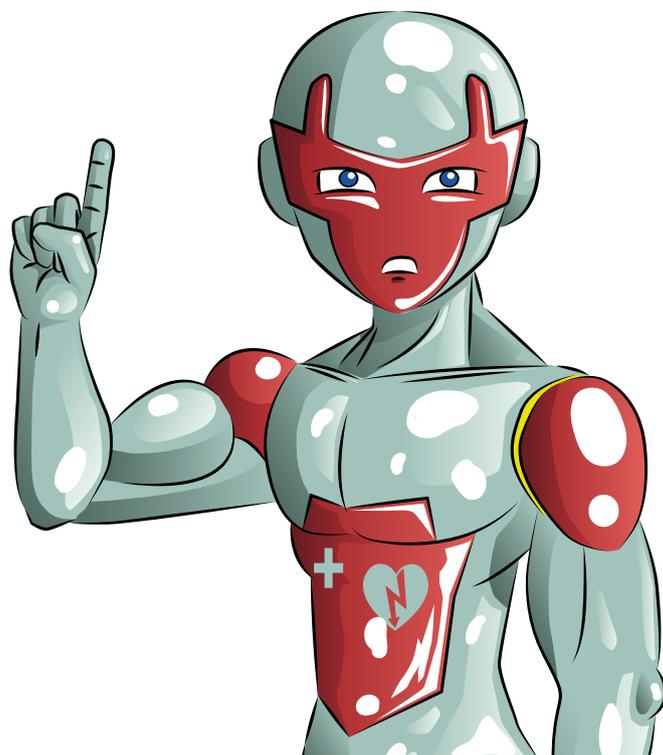



Je vous accompagne... ... sur le long terme

Je suis fiable et vous pouvez compter sur moi à tout moment : **je suis garanti 10 ans avec échange standard pendant toute la durée de garantie.**


Je suis robuste et **résiste aux projections de liquides et de poussières** (IP 55).

Je suis économe : **mes consommables sont parmi les moins chers du marché.**

Je voyage dans le respect de l'environnement : ma pile non connectée n'est pas considérée comme un matériel dangereux.

Je suis né en France : conception et fabrication 100% Française.

« **Ma pile dure 6 ans** »

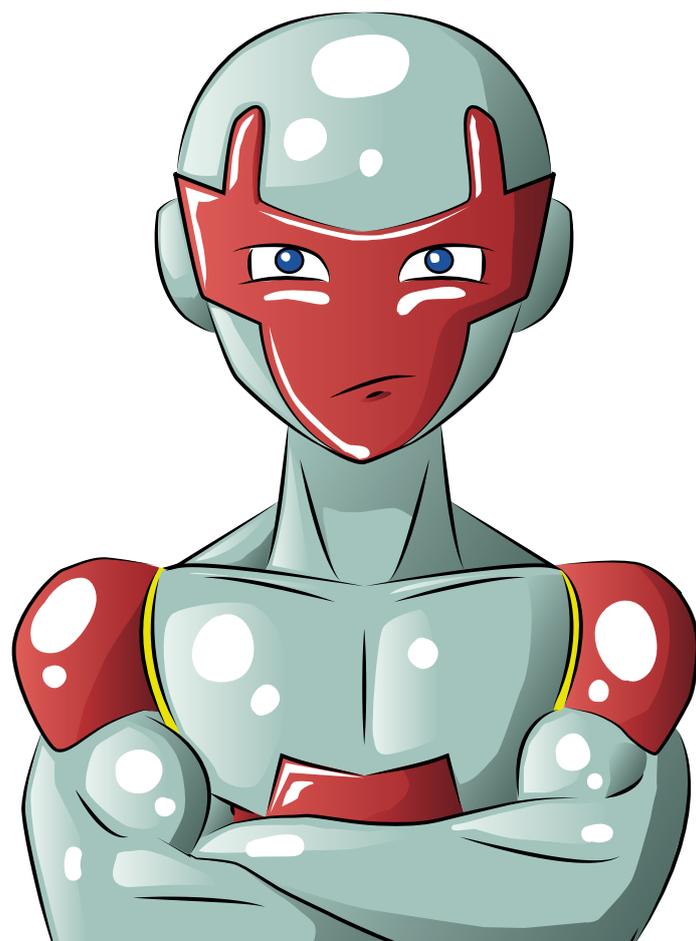

Garantie 10 ans
avec échange standard

Esprit tranquille

Les défibrillateurs sont des **dispositifs médicaux de classe II b**. En application de l'article **R.5212-25 du Code de la santé publique, selon l'arrêté du 03/03/2003**, l'exploitant a une obligation de « mise en oeuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite », dès leur mise en service.

Si les préconisations du fabricant en matière de maintenance n'étaient pas suivies, **la responsabilité de l'exploitant pourrait être engagée si un incident était imputable à un défaut de maintenance.**

Contrat de service et de maintenance

Schiller assure la maintenance préventive sur les défibrillateurs avec :

- Contrôle qualité et vérification des performances (matériel et accessoires) ;
- Mise à jour software et hardware ;
- Changement de la pile interne (à la 6^{ème} année) ;
- Maintenance en cas d'utilisation médicale avec prêt d'un matériel identique ;
- Echange standard en cas de panne ou prêt d'un matériel identique après la période de garantie ;
- Accès à une hotline spécifique : 0820 XXX XXX.



Accessoires



Electrodes

Munies d'un tag RFID, les électrodes communiquent directement à l'appareil la date de péremption et le numéro de lot. Fred PA-1 alerte avant l'échéance afin de garantir une adhérence optimale sur la peau.

Il existe deux modèles d'électrodes : adultes et enfants. Pour les enfants de moins de 25 kg (jusqu'à 8 ans), l'utilisation d'électrodes pédiatriques est fortement recommandée.

Un logement est prévu au dos de l'appareil pour y insérer une paire d'électrodes supplémentaire. Il est important de prévoir des électrodes de rechange, afin que le défibrillateur soit remis en état de fonctionnement dans les plus brefs délais en cas d'utilisation médicale.



Kit de secours

- ciseaux (pour couper d'éventuels vêtements gênants),
- rasoir (permet de raser les poils empêchant la mise en place des électrodes),
- compresses stériles et gants (pour des questions d'hygiène).

Il est préconisé de changer son kit de secours tous les 3 ans.

Service Client unique

Notre équipe d'assistance technique vous répond 7 jours sur 7, 365 jours par an, de 8h30 à 17h30 au 0820 20 22 25 ;


Notre service ordonnancement planifie les interventions de notre équipe technique sur toute la France ;

Des experts travaillent au sein de notre centre national de réparation, avec pour objectif un délai de 48h ;

Nous intervenons sous 48h et prêtons un matériel équivalent en cas d'utilisation médicale ;

Nous expédions un FRED PA-1 neuf sous 48h, en cas de panne, pendant la période de garantie ;

Un maillage complet de techniciens itinérants qualifiés avec une présence nationale de proximité nécessaire à une très bonne réactivité.

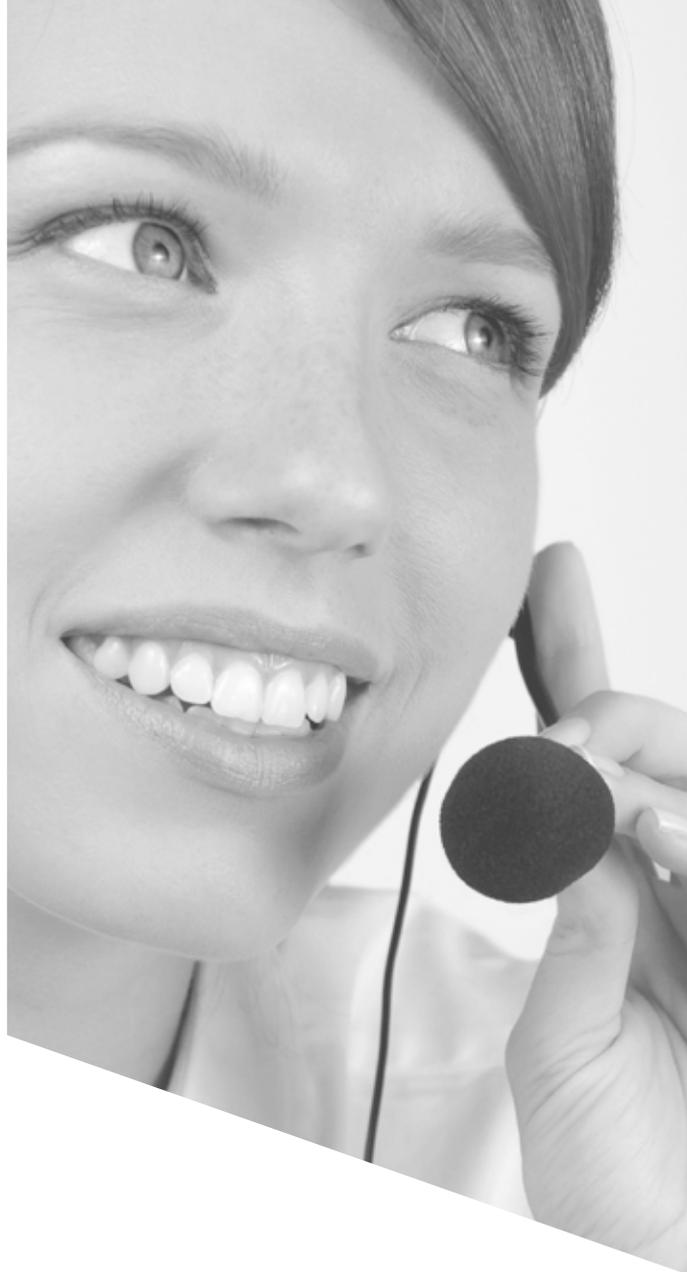

0 820 20 22 25 Service 0,09 € / min
+ prix appel

serviceclient@schillerfrance.fr



**Suivez
Schiller France !**

Schiller France
6 rue Raoul Follereau
77600 Bussy-Saint-Goerges
www.schiller-france.com
Tél. 01 64 66 50 00



SCHILLER
FRANCE S.A.S